

事 務 連 絡
令和 2 年 12 月 22 日

各連携施設
誤接続防止コネクタ導入 ご担当者様

掛川市・袋井市病院企業団立
中 東 遠 総 合 医 療 セ ン タ ー
企 業 長 兼 院 長 宮 地 正 彦

【経腸栄養分野】誤接続防止コネクタの導入について

日頃より、当院の診療業務に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度当院では、厚生労働省発出の「相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入について」を受け、令和 3 年 2 月 2 日より経腸栄養分野において誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。経腸栄養分野につきましては、連携施設間での混乱を避けるため、当院での導入状況について貴施設と情報共有したく存じます。

つきましては、別添のパンフレットをもちまして、貴施設への周知用資料としてご提供させていただきますので、内容をご確認くださいようお願い致します。

ご多用のところ恐縮ではございますが、円滑な施設間連携を図るため、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。

本件に関する問い合わせ先

管理課 物品係

担当：酒井、大塚

電話：0537-28-8695（直通）

Mail:kanrika@chutoen-hp.shizuoka.jp

※可能な限りメールでお問い合わせください。

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

中東遠総合医療センター

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については、円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切替え予定

令和3年2月2日（火）より順次 新規格へ切替を行います

今後の対応

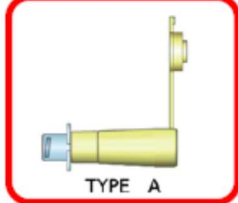
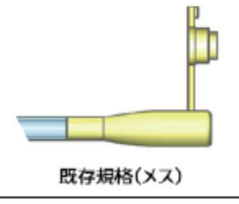
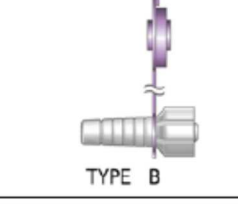
切替え日以降に当院から転出する患者さんは、右図の「新規格オス」タイプのコネクタ製品を使用します。

このタイプの製品に接続するためには、

- ①「新規格メス」の製品を直接接続する。
- ②「変換コネクタ typeA」を介して、既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

特に、「変換コネクタ typeA」がないと、既存規格オスの製品とは接続できません。

カテーテル側	変換コネクタ	投与器具側
 新規格(オス)	 TYPE A	 既存規格(オス)
 既存規格(メス)	 TYPE B	 新規格(メス)

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。

お願い

貴施設におかれましても、**変換コネクタの「typeA」のご準備**もしくは**新規格製品のご準備**をお願いいたします。

お問い合わせ先

管理課 物品係 酒井・大塚

Tel : 0537-28-8695

Mail : kanrika@chutoen-hp.shizuoka.jp

※可能な限りメールでのお問い合わせをお願い致します